

PRP RejuvinoVA

Eprubeta vacuum, ACD+ Gel, PET, 8ml

Soluția Avansată cu Plasmă Bogată în Trombocite pentru Terapii Regenerative

PRP RejuvinoVA sunt fabricate conform celor mai înalte standarde de calitate, utilizând tehnologii avansate și materiale biocompatibile, pentru a asigura siguranța și eficiența tratamentului, esențiale pentru obținerea unei plasmă bogate în trombocite.

Fiecare tub **PRP RejuvinoVA** este conceput pentru a optimiza concentrația de trombocite și factori de creștere, esențiali pentru regenerarea tisulară și accelerarea procesului de vindecare.

Prin respectarea strictă a normelor internaționale de fabricație și control al calității, produsele noastre sunt garantate a fi fiabile, sterile și ușor de utilizat, fiind destinate exclusiv utilizării medicale.

Alegând produsele PRP RejuvinoVA, beneficiați de soluții premium pentru terapii regenerative, asigurându-vă rezultate sigure și predictibile.

La preț de importator, gama noastră de dispozitive medicale este disponibilă pentru toate nevoile dumneavoastră de tratament cu plasmă bogată în trombocite.

1. Caracteristici PRP RejuvinoVA

- Dispozitiv Medical
- Dimensiune: **16 x 100 mm**
- Volum total: **12 ml**
- Compoziție: **8 ml sânge + 1 ml anticoagulant (sodium citrate) + 1,5 ml gel (thixotropic gel) + 1,5 ml spațiu gol.**
- Capacitate și compoziție: **15 ml sânge + 1,2 ml anticoagulant (sodium citrate) + 1,5 ml gel (thixotropic gel) + 0 ml spațiu gol.**
- Timpul de centrifugare: **6-10 minute**
- Forța de centrifugare: **1800-2000 G**
- Viteza de centrifugare: **3000-3300 RPM (asigurați-vă întotdeauna că centrifuga este echilibrată corect înainte de a porni)**
- Temperatura recomandată pentru depozitare: **4-25°C**
- Tuburile PRP trebuie protejate de **lumina artificială și naturală** în timpul depozitării.
- Aruncați toate materialele utilizate pentru recoltarea sângelui în **containere biohazard** aprobate.

Certificate:

- Aviz de funcționare- import din partea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale România
- Declaratie de Conformitate CE
- Certificate de Analiza pe fiecare lot distribuit
- Certificat ISO ISO13485:2016
- Raport de confirmare a eficienței sterilizării prin radiații γ (gamma).

QUICK PHARMA SRL

Sediu: Str. Matei Voievod nr 29, Sc. A, Et. 2, Birou 2.18, Bucuresti

CUI: RO 37031316; **Reg.Com.** J40/1450/2017

Banca: BRD; **Cont IBAN:** RO24BRDE441SV91119994410

M: 0788.890.002; **e-mail:** office@quickpharma.ro; **www.equickpharma.ro**

2. Pregătirea înainte de recoltare

- Asigurați-vă că pacientul este informat despre procedură.
- Verificați integritatea tubului PRP (să nu fie deteriorat sau contaminat).
- Pregătiți toate materialele necesare în condiții sterile.
- Folosiți **echipament de protecție** corespunzător.

3. Procedura de recoltare

- 1.Folosiți suportul de colectare a sângelui și acul fluture pentru a extrage sânge de la pacient și umple tubul PRP cu sânge integral.
- 2.Inversați tubul PRP de **cateva ori (5-10 ori)** pentru a amesteca sângele cu anticoagulantul și lăsați-l să stea timp de 5-10, maximum 20 de minute.

4. Ce trebuie făcut imediat după recoltare

- Nu centrifugați imediat.** Lăsați tubul PRP să stea **cateva minute** pentru:
 - o Omogenizarea completă a sângelui cu anticoagulantul.
 - o Stabilizarea trombocitelor pentru o separare eficientă.
- Asigurați-vă că **tubul PRP este echilibrat** corect în centrifugă înainte de pornire.

5. Procedura după recoltare (centrifugare și pregătire PRP)

- 1.Așezați tubul PRP în centrifugă. Asigurați-vă întotdeauna că centrifuga este echilibrată corespunzător înainte de a porni.
- 2.Centrifugați la Forța de centrifugare: **1800-2000 G** și Viteza de centrifugare: **3000-3300 RPM timp de 6-10 minute.**
- 3.După centrifugare:
 - RBC (globulele roșii) și majoritatea WBC (globulele albe) se vor afla sub stratul de gel separator.
 - Plasmă bogată în trombocite (PRP) se află deasupra gelului.
- 4.Rotiți ușor tubul PRP de **cateva ori** pentru a resuspenda trombocitele în plasmă.
- 5.Se amestecă supernatantul de plasmă cu plasma bogată în trombocite, inversând-o de cinci ori.
- 6.**Introduceți acul de puncție spinală 18G în seringă și injectați-l în tubul PRP centrifugat pentru a extrage plasma bogată în trombocite (PRP concentrate).**

6. Ce trebuie făcut după injectare

- Urmăriți pacientul pentru eventuale reacții adverse.
- Asigurați-vă că pacientul respectă instrucțiunile post-tratament.
- Eliminați în siguranță toate materialele utilizate în **containere biohazard.**

7. Precauții generale în utilizarea PRP

- 1.**Depozitare corespunzătoare:** Tuburile PRP trebuie păstrate la **4-25°C** și protejate de lumina directă.
- 2.**Utilizare imediată:** PRP trebuie folosit **în cel mult 2 ore** de la preparare.
- 3.**Evitarea contaminării:** Utilizați **tehnici sterile** pentru recoltare, manipulare și administrare.
- 4.**Respectarea parametrilor de centrifugare:** Nu modificați viteza sau durata centrifugării.
- 5.**Verificarea integrității tubului:** Nu utilizați tuburi deteriorate sau contaminate.
- 6.**Utilizare individuală:** PRP este destinat **exclusiv pacientului de la care a fost recoltat.**
- 7.**Precauții la pacienți cu afecțiuni specific (click):**

QUICK PHARMA SRL

Sediu: Str. Matei Voievod nr 29, Sc. A, Et. 2, Birou 2.18, Bucuresti

CUI: RO 37031316; Reg.Com. J40/1450/2017

Banca: BRD; Cont IBAN: RO24BRDE441SV91119994410

M: 0788.890.002; e-mail: office@quickpharma.ro; www.equickpharma.ro

o Evitați utilizarea PRP la pacienți cu **tulburări de coagulare, infecții active, cancer sau boli autoimune.**

o Atenție la pacienții aflați în tratament cu **anticoagulante.**

8.Administrare de către personal calificat: Procedurile PRP trebuie realizate doar de **medici sau personal medical instruit.**

9.Evitarea contactului cu aerul: Expunerea PRP la aer poate reduce eficiența acestuia.

10.Eliminare corectă: Aruncați toate materialele utilizate în containere **biohazard** aprobate.

QUICK PHARMA SRL

Sediu: Str. Matei Voievod nr 29, Sc. A, Et. 2, Birou 2.18, sector 2, Bucuresti

CUI: RO 37031316; **Reg.Com.** J40/1450/2017

Banca: BRD; Cont IBAN: RO24BRDE441SV91119994410

M: 0788.890.002; **e-mail:** office@quickpharma.ro; **www.equickpharma.ro**